


Для обеспечения **более плотного прилегания электродов к голове** используйте «ретиласт» — *высокоэластичный трубчатый бинт* — шириной **5 см** (в нерастянутом виде).

Вариант 1

- 1** Отрежьте кусок бинта длиной 30—35 см
- 2** На расстоянии 6—7 см от одного из концов сделайте поперечный разрез, равный половине диаметра бинта
- 3** На другом конце завяжите узел
- 4** Растяните бинт руками и наденьте на голову, закрепив нижнюю часть под подбородком

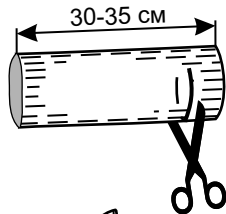


Внимание!

При длительном обследовании не рекомендуется использовать подбородочный ремень.

Дополнительная фиксация с помощью «ретиласта» (вариант 2)

- 1 Отрежьте кусок бинта длиной 30 см
- 2 На одной стороне бинта сделайте продольный разрез длиной 10 см
- 3 Растяните бинт руками и натяните на голову поверх шлема (разрез должен оказаться на горле)

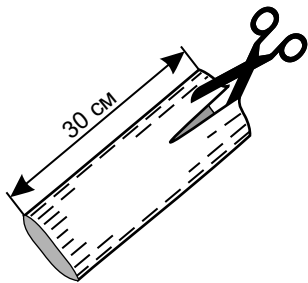

*Hartmann Stulpa®-fix –
сетчатый трубчатый бинт на
голову и детское туловище, № 4*

Описание см.:
<http://www.okapia.ru/product/29891/>