

НЕЙРО-ТОКС

Прибор для локализации места инъекции лекарственных препаратов
методами регистрации ЭМГ и электростимуляции

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — В ТОЧНОСТИ


локализации места инъекции



- регистратор ЭМГ и токовый стимулятор в одном приборе
- локализация места инъекции методами регистрации спонтанной ЭМГ и электростимуляции
- портативный
- простое управление
- звуковая и визуальная индикация ЭМГ

ЭМГ

В случае когда эффективность терапии во многом зависит от выбора точного места введения препарата, не обойтись без специального оборудования. Портативный прибор «Нейро-Токс» позволяет быстро и точно локализовать место инъекции препарата путем регистрации электромиограммы (ЭМГ) целевой мышцы или электростимуляции. Превосходное качество сигнала исключает возможность ошибки, а интуитивно понятный интерфейс дает возможность моментально освоить технику работы с прибором.

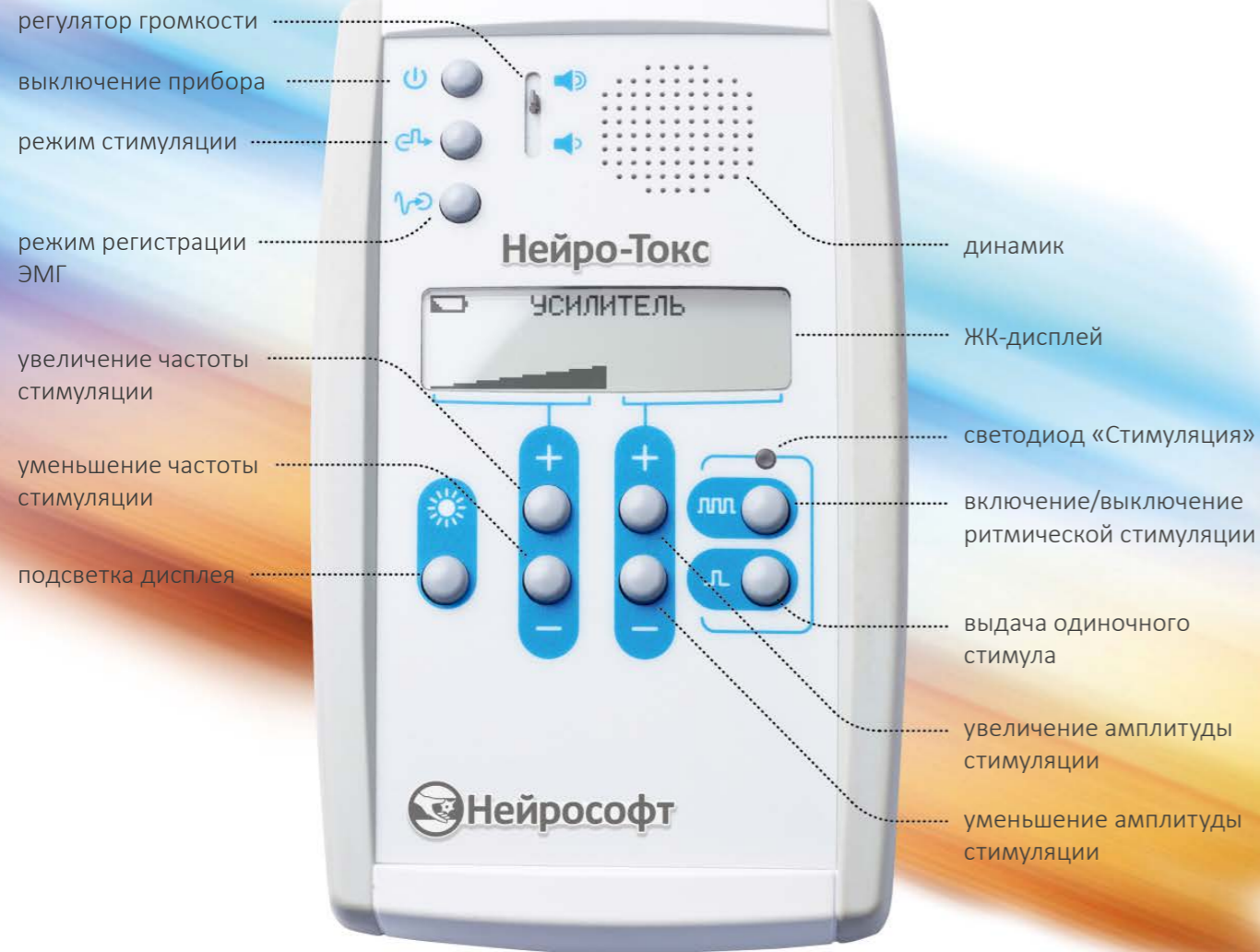

«НЕЙРО-ТОКС»: КОГДА ВАЖНА ТОЧНОСТЬ

«Нейро-Токс» представляет собой электронный блок, к которому подключается игольчатый электрод со шприцем. Электрод вводится в мышцу, пациент напрягает ее, и прибор регистрирует электромиографический сигнал. Чем выше амплитуда сигнала, тем ближе к искомой мышце находится кончик иглы. В случае если пациент не может самостоятельно напрячь мышцу, используется электростимулятор. Вам остается только сделать инъекцию точно в цель!



Чем ближе игла к искомой мышце, тем громче звуковой сигнал

ПРИМЕНЕНИЕ:

фокальные формы дистоний: блефароспазм, цервикальная дистония, спастическая дистония, писчий спазм, оромандибулярная дистония, проявления идиопатической торсионной дистонии, страбизм

реабилитация больных детским церебральным параличом, рассеянным склерозом, а также после черепно-мозговых травм, травм спинного мозга, инсультов

миофасциальные и вертеброгенные болевые синдромы, головная боль напряжения, первичный локальный гипергидроз, гиперфункциональные морщины



Мгновенно определить, есть ЭМГ-ответ или нет, можно с помощью звукового сигнала, генерируемого прибором при регистрации миограммы, — просто наденьте наушники. Это очень удобно!



ОБУЧЕНИЕ И СЕРВИС



Покупая прибор у нас, вы можете рассчитывать на всестороннюю поддержку специалистов компании «Нейрософт».



Вместе с прибором вы получаете подробные технические и методические руководства.



Все, кто приобретает оборудование, произведенное компанией «Нейрософт», имеют возможность бесплатно пройти обучение работе на нем на нашей собственной учебной базе.



Мы предоставляем 24-месячную гарантию на всю электронику и возможность бессрочного обновления программного обеспечения.

ПОКУПАЯ ПРИБОР «НЕЙРО-ТОКС», ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

- электронный блок «Нейро-Токс»
- пульт дистанционного управления
- наушники-вкладыши
- электрод-иглу одноразовый для инъекций лекарственных препаратов под контролем ЭМГ
- кабели для подключения электродов с коннектором «кнопка»
- комплект референтных одноразовых электродов
- зарядное устройство



АВГУСТ
2018



www.neurosoft.com, info@neurosoft.com
Телефоны: +7 4932 24-04-34, +7 4932 95-99-99
Факс: +7 4932 24-04-35
Россия, 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5