



Памятка пациента по работе с респираторным полиграфом «Снорлекс»


1 Зафиксируйте блок полиграфа чуть выше запястья левой руки, так чтобы белый разъем (для назальной канюли) был направлен к плечу.

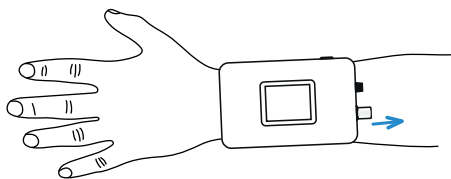





2 Закрепите один ремень на уровне подмышечных впадин, а второй — на линии талии. Вам необходимо чувствовать натяжение ремней, но они не должны затруднять дыхание. Присоедините датчик к грудному (верхнему) ремню с помощью клепок, так чтобы черный провод был направлен вверх. Соедините брюшной (нижний) ремень с датчиком, используя специальный кабель.

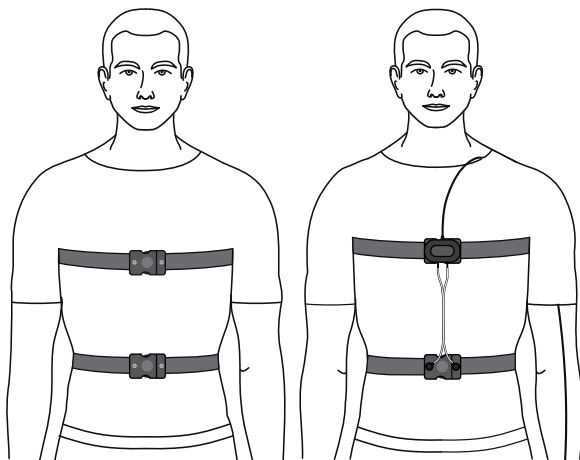

3 Подключите провод от датчика на грудном (верхнем) ремне к черному разъему блока полиграфа.

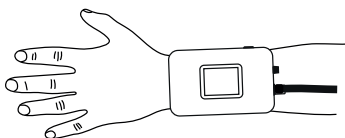


4 Убедитесь, что упаковка назальной канюли не повреждена. Распакуйте канюлю. Осторожно введите носовые зубцы канюли в носовые ходы. Закрепите пластиковые трубки канюли за ушами и с помощью подвижной пластинки затяните петлю под подбородком. Зафиксируйте трубки канюли на щеках, используя лейкопластырь.

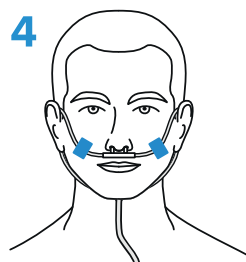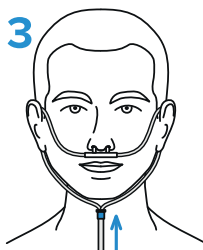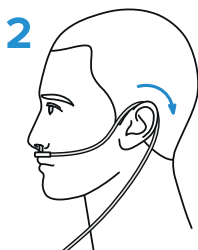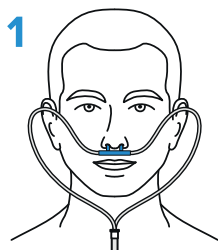

G090.00.105.01.000
20.10.2022

Вставьте конец трубки канюли в белый разъем блока полиграфа и вращательным движением надежно соедините канюлю с ним. Дополнительно закрепите трубку и провод лейкопластырем на руке.

5 Установите пульсоксиметрический датчик на указательный палец левой руки. Прикрепите провод к тыльной стороне ладони с помощью лейкопластыря. Вставьте кабель пульсоксиметрического датчика в соответствующий разъем блока. Убедитесь, что датчик не слетает с пальца, а кабель не выпадает из разъема.

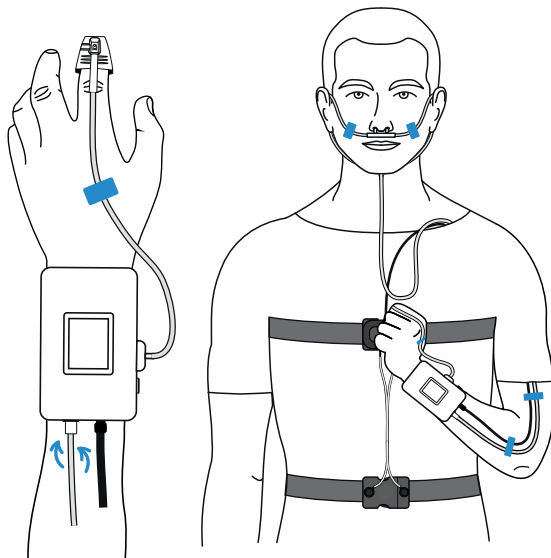


Перед фиксацией пульсоксиметрического датчика удалите лак для ногтей (если он имеется) с указательного пальца левой руки.

6 Запись автоматически начинается при подключении пульсоксиметрического датчика к блоку полиграфа.

Если во время обследования вы почувствуете дискомфорт из-за пульсоксиметрического датчика, то можете снять его с указательного пальца и установить на другой палец левой руки.

Проверка работы полиграфа

На дисплее должны отображаться значения SpO_2 и частоты пульса.

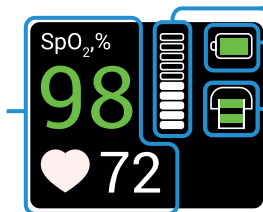

Цвет столбца изменяется синхронно с вдохом и выдохом. Индикатор заряда батареек должен быть зеленого цвета. Схематическое изображение ремней должно быть зеленым.

Завершение обследования

Чтобы остановить запись, извлеките кабель пульсоксиметрического датчика из разъема блока полиграфа (или снимите датчик с пальца), после чего нажмите на кнопку управления на корпусе прибора и удерживайте ее до появления на дисплее сообщения «Обследование завершено». Аккуратно снимите блок полиграфа, канюлю и пульсоксиметрический датчик. Их необходимо упаковать в сумку для переноски полиграфа и вернуть в медицинское учреждение.