



NEURO-MSX



Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) — это неинвазивный метод воздействия на кору головного мозга с помощью мощных (до 3 Тл) магнитных импульсов. В режиме ритмической стимуляции частота может достигать 150 Гц, а в режиме theta-burst — 2000 Гц. Магнитное поле свободно проникает через одежду и ткани человеческого организма, избирательно активируя нейронные сети.

Высокочастотная стимуляция и прерывистая theta-burst-стимуляция (iTBS) оказывают активирующее действие, тогда как низкочастотная стимуляция и непрерывная theta-burst-стимуляция (cTBS), напротив, снижают возбудимость нейронов. Процедура ТМС безболезненна, не требует подготовки пациента и занимает от 40 секунд до 37 минут в зависимости от выбранного протокола.

Система динамического жидкостного охлаждения индуктора обеспечивает возможность проведения продолжительных сеансов терапии.

ТМС ЭФФЕКТИВНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:

- Депрессия (уровень А)
- Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР)
- Шизофрения (негативные симптомы и слуховые галлюцинации)
- Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР)
- Расстройства аутистического спектра (РАС)
- Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)
- Различные виды зависимости
- Булимия и другие заболевания

КОДЫ ВИДОВ НКМИ

325490 | 325500 | 285040

Входит в стандарты оснащения медицинских учреждений и клинические рекомендации

Приказы:

- 688н
- 468н
- 471н
- 459н и другие


Клинические рекомендации:

- Депрессивный эпизод. Рекуррентное депрессивное расстройство
- Шизофрения
- Паническое расстройство
- Обсессивно-компульсивное расстройство
- Посттравматическое стрессовое расстройство

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УДОБНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

50+

встроенных протоколов для лечения психических заболеваний с доказанной эффективностью*

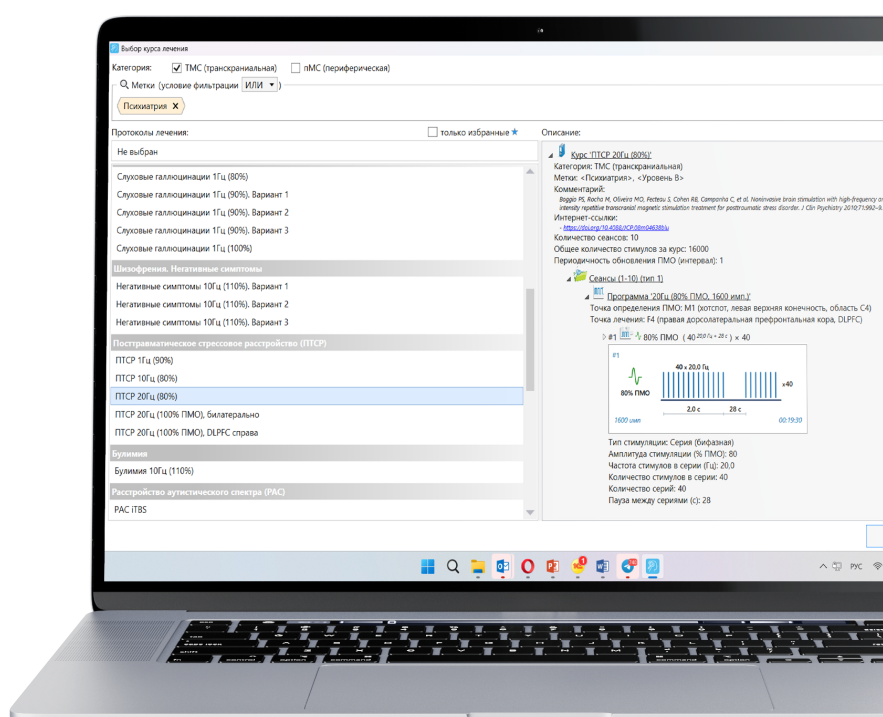

ДВОЙНОЙ КОНИЧЕСКИЙ ИНДУКТОР ДЛЯ ГЛУБОКОЙ СТИМУЛЯЦИИ МОЗГА

Обеспечивает самую глубокую стимуляцию, в том числе корковых представителей и DMPFC (нижних, при ОКР), а также тазового дна и мозжечка (при атаках, нарушении координации и др.).

На фото — ИДК-03-125-0

* Все протоколы лечения соответствуют принципам доказательной медицины: они разработаны на основе клинических исследований и успешно применяются в медицинской практике. Результаты подтверждены научными публикациями и испытаниями.